

# キラリ

# 泡タイプ



お家でも、お出かけ先でも短時間で手軽にキレイを保ちましょう


## 短時間洗浄



待ち時間いらず！  
装着前の**60秒**ケア

## 消臭効果

[ニッシン調べ]

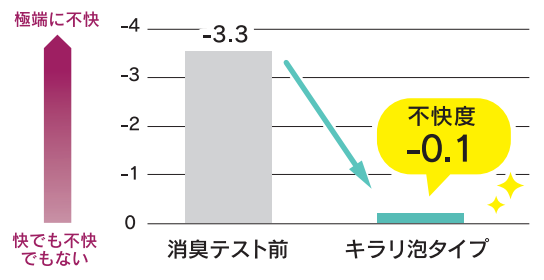

マウスピースについての嫌な臭い\*をすっきり除去！  
\*口臭由来の揮発性硫黄化合物3成分に対する消臭効果

## フルーツミントの香り



お子さまでも使いやすい  
甘くやさしい香り

## マウスピースの洗い方

**STEP 1**

1プッシュ

口腔内装置の上に適量の泡を0.5~1プッシュ程度出してください。

**STEP 2**

約60秒間を目安に汚れが落ちるまで柔らかいブラシを用いてブラッシングしてください。

**STEP 3**

流水でしっかりすすいでください。

## ご使用上の注意

※使用前にお読みください。


口の中に直接入れて使用しないでください。



必ず柔らかい歯ブラシを用いて洗浄してください。



## 保管場所について

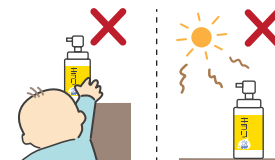

乳幼児や第三者の監督が必要な方の見えないところ及び手の届かない、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。

## 応急処置

- 本製品の使用により過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師、歯科医師にご相談ください。
- 飲み込んだ場合は、口をよくすすぎ、水または牛乳を飲ませて医師の診断を受けてください。
- 目に入った場合は直ちに清浄な流水で15分以上洗浄して医師の診断を受けてください。

発売元 **株式会社モリタ**  
大阪府吹田市垂水町3-33-18

製造販売元 **株式会社ニッシン**  
京都府亀岡市旭町樋ノ口88  
www.nissin-dental.jp

お求めは当院まで